

BAT KT7 (USA/Kanada) BAT KT8 (International)

Ladegeräte für Pocketalker 2.0

KURZANLEITUNG

BAT KT7 (USA und Kanada)



BAT KT8 (International)





Sicherheitshinweise

1. Der Pocketalker 2.0 darf nicht in geschlossenen Umgebungen wie Handtaschen oder Koffern aufgeladen werden, da hierbei Verletzungsgefahr besteht.
2. Um Verletzungen zu vermeiden, trennen Sie das Gerät bei Gewittern und nach abgeschlossenem Ladevorgang, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, von der Stromversorgung.
3. Verwenden Sie den für das jeweilige Land geeigneten Netzadapter. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
4. Um Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie nur das von Williams Sound mitgelieferte Netzteil. Andere Netzteile können ähnliche Spezifikationen aufweisen, sind aber möglicherweise nicht gleichwertig. Die Verwendung eines nicht genehmigten Netzteils kann das Gerät ganz oder teilweise unbrauchbar machen und führt zum Erlöschen der Garantie.
5. Sorgen Sie dafür, dass niemand auf das Netzkabel treten kann und dass dieses nicht geknickt wird, insbesondere nahe der Stecker und Steckdosen sowie nahe des Netzanschlusses am Gerät. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

Produktbeschreibung

Das BAT KT7 und der BAT KT8 dienen zum Laden des Williams Sound Pocketalker 2.0 bei Verwendung von NiMH-Akkus.

Beim **BAT KT7** handelt es sich um die Version mit US-Stecker für die USA und Kanada.

Beim **BAT KT8** handelt es sich um eine internationale Version mit Adaptern für Großbritannien, Europa und Australien. Diese Version ist CE-konform und erfüllt die Bestimmungen der europäischen Medizingeräterichtlinie.

WARNUNG!

VERWENDEN SIE DIESES GERÄT AUSSCHLIESSLICH MIT NiMH-AKKUS: WILLIAMS SOUND-PN BAT 022 (oder gleichwertigen NiMH-Akkus vom Typ AAA mit 1,2 V DC).

Vorbereiten des BAT KT7 für den Gebrauch

1. Halten Sie das Ladegerät fest und heben Sie die Steckerstifte mit einem Finger an.



2. Ziehen Sie die Steckerstife bis zum Anschlag.



Vorbereiten des BAT KT8 für den Gebrauch

Wählen Sie den für das jeweilige Land geeigneten Netzadapter aus.

1. Setzen Sie den Netzadapter wie dargestellt auf das Netzteil und schieben Sie diesen (rechts) so weit wie möglich nach unten.



2. Drehen Sie den Adapter nach oben/links, bis er einrastet.



Entfernen **des** Adapters:

1. Drücken Sie die Nase nach unten und ziehen Sie diese zurück.
2. Drehen Sie den Adapter bei zurückgezogener Nase nach rechts.



3. Lassen Sie nach dem Lösen des Adapters die Nase los.



Laden des Pocketalker




WARNUNG!

STELLEN SIE VOR DEM ANSCHLIESSEN DES LADEGERÄTS AN DEN POCKETALKER SICHER, DASS IN DEN POCKETALKER NiMH-AKKUS (UND KEINE ALKALI-BATTERIEN) EINGESETZT SIND.

1. Öffnen Sie das Akkufach des Pocketalker und stellen Sie den Akkuschalter in die Stellung NiMH (Abbildung 1).

Abbildung 1: Akkufach

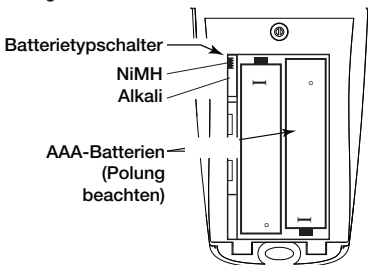

2. Legen Sie zwei NiMH-Akkus vom Typ AAA ein. Achten Sie auf die korrekte Polung (Abbildung 1).

3. Schließen Sie das **USB-Kabel** wie dargestellt (je nach Ladegerät gemäß Abbildung 2 oder 3) an:

a. Verbinden Sie den USB-Stecker „A“ (groß, rechteckig) mit dem USB-Anschluss am Netzteil. Wenden Sie keine Gewalt an. Wenn der Stecker nicht passt, drehen Sie diesen um 180° und versuchen Sie es erneut.

b. Verbinden Sie den USB-Stecker „Micro-B“ (klein) mit dem Ladeanschluss des Pocketalker.

4. Befolgen Sie die Anweisungen im vorherigen Abschnitt zur Vorbereitung Ladegeräts für den Gebrauch.

5. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose (Abbildung 2 oder 3).

– Die Ladeleuchte am Pocketalker blinkt langsam, während die Akkus geladen werden. Wenn die Akkus voll geladen sind, leuchtet sie durchgehend.

– Es dauert ca. 16 Stunden, bis die Akkus voll aufgeladen sind.

Abbildung 2: Anschluss des BAT KT7 beim Laden


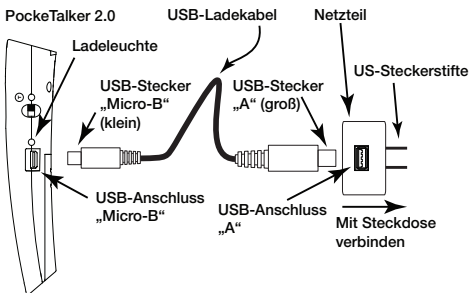


Abbildung 3: Anschluss des BAT KT8 beim Laden

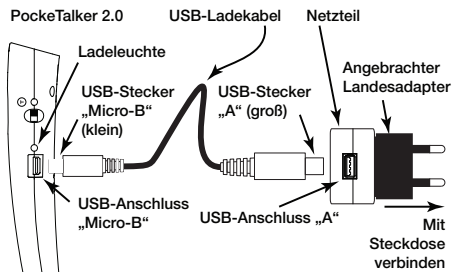

Technische Daten des Netzteils

Gewicht	0,4 lbs
Stromaufnahme	100-240 V AC, 50-60 Hz, 0,5-0,3 A
Ausgangsleistung	5 V DC, 2,0 A

Garantie

Für das BAT KT7 und das BAT KT8 gilt eine Garantie von 90 Tagen.

Kundendienst

Wenden Sie sich bei Problemen mit Ihrem System telefonisch gebührenfrei an die Kundenbetreuung:

1 800 328 6190 (USA) oder

+1 952 943 2252 (außerhalb der USA)

Wenn das Gerät zu einer Überprüfung zurückgesendet werden muss, erhalten Sie vom Kundendienst eine RA-Nummer (Return Authorization) und Versandanweisungen.

WILLIAMS AV

10300 Valley View Rd • Eden Prairie, MN 55344

+1 800 328 6190/+1 952 943 2252 • FAX: +1 952 943 2174

www.williamsav.com

©2020 Williams AV, LLC

MAN 200E